

# LISTA ANALISI in ORDINE ALFABETICO

Revisione	Data	Modifiche
01 – 02		Versioni sede Ospedale Vecchio
03	Novembre 2007	Prima versione Ospedale nuovo
03 bis	2008	- Aggiornamenti
04	Agosto 2009	- Aggiornamenti
05	Agosto 2010	- Aggiornamenti
06	Settembre 2010	- Aggiornamenti
07	Luglio 2011	- Aggiornamenti
08	Dicembre 2011	- Aggiornamenti
09	Agosto 2012	- Aggiornamenti
10	Settembre 2012	- Aggiornamenti


Revisione	Data	Modifiche
11	Marzo 2013	- Aggiornamenti
12	Settembre 2014	- Aggiornamenti
13	Maggio 2015	- Aggiornamenti
14	Ottobre 2015	- Aggiornamenti
15	Novembre 2016	- Aggiornamenti
16	Agosto 2018	- Aggiornamenti
17	Agosto 2019	- Aggiornamenti
18	Giugno 2022	- Aggiornamenti
19	Giugno 2023	- Aggiornamenti

Data applicazione : 29/06/2023

Redatta da: TSLB Cambioli Georgia

Verificata da: Coordinatore Rossi Silvia

Approvata da: Dot.ssa Novella Scattolo

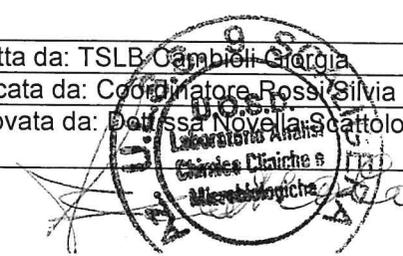

**LISTA ANALISI Laboratorio San Bonifacio**      Revisione 19 del 08/06/2023

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ACETILCOLINA Anticorpi anti recettore nicotinico acetilcolina (AChR)	<b>ABRAC</b>	<b>427</b>	<b>ABRAC</b>	BT	Sr	ruggine piccola	Centrifugare entro 30 minuti		Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20°
ACE	<b>ACE</b>	<b>449</b>	<b>ACE</b>	Synlab	Sr	bianca piccola			Campione frigorifero n°3
ACETONE/ KETONI urine	<b>UACE</b>	<b>810 017</b>	<b>U-ACE + prov. DIUcc</b>	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi		(determinazione semiquantitativa corpi chetonici)	
<i>ACETAMIDE MONO METIL</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>ACETILSALICILICO ACIDO vedi SALICILATI</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								
<i>ACETONE (solo per esposizione lavorativa)</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
ACIDI BILIARI	<b>ACB</b>	<b>003</b>	<b>CHIMM</b>	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ACIDO AMINOLEVULINICO (ALA) Vedi Porfirine URINARIE (UPORF)	<b>UPORF</b>	<b>606</b>		BR	Ur 24h		Al Buio	Compreso nel pannello UPORF	
<i>ACIDI GRASSI PLASMATICI (Profilo di esami )</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	PI	VIOLA grande		Prendere accordi con B.Roma tel.0458124266	Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20° (almeno 1 ml plasma).
<i>ACIDI ORGANICI urine</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			PD	Ur	provetta U-VERDE minimo 2 ml	A freddo		Clinica pediatrica, malattie metaboliche ereditarie, 3° piano di fronte entrata principale <b>NB</b> Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 049 8212536

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
Acido METIL-IPPURICO (solo per Interni - Medico Competente)	<b>MIPPU</b>	<b>612</b>	<b>MIPPU</b>	Synlab	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi	U_ROSSO		SOLO PER INTERNI - Medico Competente	Provetta frigorifero n. 3
ACTH: ormone adrenocorticotropo <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>ACTH</b>	<b>620</b>	<b>ACTH *</b>	Legnago	PI	viola piccola	provetta prerrefrigerata, a freddo consegnata subito in laboratorio	Esame NON richiedibile da Centri prelievi periferici.	Centrifugare a freddo, aliquota in cong a -20° entro 1 ora dal prelievo
ACTH sera 18	<b>ACTHS</b>	<b>621</b>	<b>ACTHsera*</b>	Legnago	PI	viola piccola	provetta prerrefrigerata, a freddo consegnata subito in laboratorio	Esame NON richiedibile da Centri prelievi periferici.	Centrifugare a freddo, aliquota in cong a -20° entro 1 ora dal prelievo
ACTH TEST: CORTISOLO E' necessario prendere accordi con il medico di Laboratorio Analisi	<b>SYNA2</b>	<b>565 566 567</b>	<b>verde COR01 verde COR02 verde COR03</b>	Legnago	PI	verde scuro	ACTH CORT. BASE ACTH CORT 30MIN ACTH CORT 60 MIN	Per eseguire l'esame bisogna prendere accordi con il medico di Laboratorio per effettuare infusione di ACTH.	Aliquotare e congelare in cong. N° 5 a -20°
ACTINA Ab f-actina	<b>FACT</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
ADDIS(conta di)								Non richiedibile	
ADENOVIRUS FECI antigeni	<b>ADENO</b>	<b>392</b>	<b>VIRUS</b>	SB	Feci	vasetto sterile			
ADH ( Ormone Anti Diuretico - Vasopressina)								Non richiedibile	
ADRENOCORTICOTROPO ormone vedi ACTH									
AGGLUTININE (a freddo e a caldo) <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>AGGLU</b>	<b>087 089 025 090</b>	<b>GRU TCI TCD SIT 37°</b>	SBct	Sg	FUCSIA grande	3 provette a 37° C chiedere il contenitore per trasporto e provette in laboratorio	Provette e materiale di prelievo preriscaldati portati al Centro Trasfusionale di SB a 37°C sia a freddo che a caldo. <b>Firmare le provette</b>	
AGGREGAZIONE PIASTRINICA vedi PFA 100									
ALBUMINA	<b>ALB</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola			
ALBUMINURIA (microalbuminuria) 1a minzione	<b>MICR</b>	<b>906</b>	<b>MICRA</b>	SB	Ur 1° minz.	Provetta U-VERDE		<b>Si esegue anche creatininuria</b>	
ALBUMINURIA TEMPORIZZATA (microalbuminuria)	<b>MICRU</b>	<b>047 035</b>	<b>MICRA + provetta DIUcc</b>	SB	Ur	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi		Provetta con diuresi e tempo di raccolta	
ALCOOL ETILICO	<b>ALCOS</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola		Disinfettare con sostanze non alcoliche (firma su provetta per scopi medico legali).	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ALCOOL ETILICO Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	ALCOU	040	DAU	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Richiedere CREAU se viene richiesto singolarmente	
ALDOSTERONE (screening)	SARR	817	ALDO	Legnago	PI	2 provette VIOLA grande			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
ALDOSTERONE clinostatismo	SARR			Legnago	PI	2provette VIOLA grande		Non più richiedibile singolarmente Aldosterone clino e/o Aldosterone orto. Si richiede sempre rapporto Renina/Aldosterone	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
ALDOSTERONE ortostatismo	SARR			Legnago	PI	2 provette VIOLA grande		Non più richiedibile singolarmente Aldosterone clino e/o Aldosterone orto. Si richiede sempre rapporto Renina/Aldosterone	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
ALDOSTERONE + RENINA (Ortostatismo / clinostatismo)	SARR	483 817	REN ALDO	Legnago	PI	2 provette VIOLA grande			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
ALDOSTERONE urinario	ALDOU	405	uALDO DIUcc	Synlab	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone acidificato con diuresi		Acidificare con acido borico	
ALFA GALATTOSIDASI N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Sg	3 provette VIOLA grande Servono 15 ml di sangue	Entro h 7.30 A freddo	Previo accordo con neuropatologia tel 045 8124461	
ALFA 1 ANTITRIPSINA	A1ATR	010	NEFEL	SB	Sr	TRASPARENTE grande			
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								Non richiedibile	
ALFA 1 MICROGLOBULINA	A1MIC	406	A1MIC	Synlab	Urine mattino			Prima del mattino, raccolta con mitto intermedio	Campione frigorifero n°3
ALFA FETOPROTEINA	AFP	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande		In accettazione indicare se gravidanza (1) o non gravidanza (0)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ALOTANO I pazienti esterni devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro di BR N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							I pazienti esterni devono rivolgersi personalmente alla Med. del Lavoro di BR 045 8124293	
ALLUMINIO sierico	ALLUS	129	AL_Sr	BR	Sr	Provetta dedicata (Propilene GRANDE)	Richiedibile solo x paz. DIALISI allegare fotocopia ricetta medica	Non centrifugare e non aprire le provette. Provetta fornita direttamente dalla medicina del lavoro.	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ALT (GPT)	ALT	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
AMA anticorpi anti mitocondri	AMA	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
AMEBA ricerca feci	PARF1	183	Vster	Synlab	feci	Vasetto sterile	Scrivere su etichetta : " AMEBA"	Scrivere su etichetta : "AMEBA"	
AMEBA sangue	AMEB	341	AMEB	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
AMANITINA su urine N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BT				Richiesta per sospetto di intossicazione da funghi	Laboratorio B.T. 0458122154  Sentire dott. Ricci dott. Zannoni tel. 366 5025004 responsabili di TOSSICOLOGIA pronto soccorso di B.T. tel. 045 8122120 /1 oppure dott. Cocco tel. 045 812254 laboratorio di B.T.
AMH ormone antimulleriano indirizzare il paziente a BR N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR					tel.a B.R. dott.Salvagno tel. 04581216880 per sentire se lo fanno
AMINOACIDI urine Indirizzare il paziente in Azienda Ospedaliera di Padova N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD			indirizzare il paziente direttamente a Padova		NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914
AMINOACIDI plasma Indirizzare il paziente in Azienda Ospedaliera di Padova N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD			indirizzare il paziente direttamente a Padova		NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914
AMP CICLICO N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR	1°minzione + Ur 24h	Provetta U_GIALLO 1° minzione + provetta U_ROSSO urine 24 h	SOLO per ricerca		
AMIKACINA (No centri prelievi Periferici)	AMIKA	504		Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare entro 30 min in centrifuga refrigerata. Sierare, cong. n° 5 a -20°

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
AMIKACINA post dose (No centri prelievi Periferici)	AMIKP	573		Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare entro 30 min in centrifuga refrigerata. Sierare, cong. n° 5 a -20°
AMILASI	AMI	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
AMILASI PANCREATICA	AMIP	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola		Sostituisce "amilasi isoenzimi"	
AMILASI urine	AMIU	902 017	ChUri DIUcc	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
AMILOIDE A	SAA	941	SAA	Synlab		OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
AMINOACIDI URINARI	AMINU	476	AMINU	PD	Ur 24h + 1 minzione	U_ROSSO		Inviare congelato al Lab Malattie Metaboliche (Campus Biomedico Pietro D'Abano - 0458212536 - Via Giuseppe Orus 2B Padova)	NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914
AML1/ETO Riarrangiamento genetico Oncoematologico	AML	221	BIOLM	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	NON serve appuntamento	
AMMONIO	NH4	018	NH4 *	SB	Sg	viola piccola	A freddo	Spedire il più velocemente possibile in laboratorio	
ANA (anticorpi anti nucleo)	ANA	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ANCA (anticorpi anti citoplasma neutrofili)	ANCA	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande		Richiedere con ANTI-MPO e ANTI-PR3	
Androstenediolo Glucoronide								Non eseguibile	
Androstenedione Delta 4 vedi DELTA 4 ANDROSTENEDIONE									
ANFETAMINE/ METANEFINE Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	AMFE	040	DAU	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREAU se viene richiesto singolarmente	
ANTI-PLA2R (IFI)	PLA2R	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ANTI-PLA2R (ELISA)	PLA20	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ANTITROMBOSPONDINA	TROMB	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
Anticorpi anti Actina F	ACTIN	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
Anticorpi anti Acetilcolina Recettori vedi ACETILCOLINA RECETTORI									
Anticorpi anti Adenovirus vedi PNEUMOTROPI agenti								Compresa nel pannello Pneumotropi agenti	
Anticorpi anti Ameba vedi AMEBA									

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
Anticorpi Anti BP180 e BP230 Non richiedibile per esterni	CUTE	614	CUTE	BR Ip	Sr	ruggine piccola		<b>SOLO PER INTERNI</b> Il codice contiene Ab BP180-Ab + BP 230 + Ab Desmogleina G1 e Ab Desmogleina G3	Se prelievo di venerdì o sabato congelare siero cong. N° 5 a -20°
Anticorpi anti Campylobacter								Non richiedibile	
Anticorpi anti Cellule parietali gastriche vedi APCA									
Anticorpi anti Cervelletto vedi GANGLI Ab									
Anticorpi anti Citoplasma neutrofilo vedi ANCA									
Anticorpi anti Enterovirus vedi NEUROTROPI agenti									
<i>Anticorpi anti Eparina</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Ct BT		OCRA grande		Stesse modalità esame APIAS	
Anticorpi anti Eritrociti vedi COOMBS TEST									
Anticorpi anti IA2 ( Insulinoma antigene 2) Ab	IA2	220	DIAB	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
Anticorpi anti ICA vedi INSULA PANCREATICA									
Anticorpi anti Microsomi epatici e renali vedi LKM									
Anticorpi anti Microsomi tiroidei vedi TIREOPERROSSIDASI									
Anticorpi anti Mitocondrio vedi AMA									
Anticorpi anti Muscolo liscio vedi ASMA									
<i>Anticorpi anti Musk</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Synlab	Sr	ruggine piccola		esame NON richiedibile per esterni	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
Anticorpi anti Muscolo scheletrico/ striato vedi MUSCOLO STRIATO Ab									
Anticorpi anti Neuroni vedi ONCONEURALI Ab									
Anticorpi anti NON Organo specifici vedi ANA									
Anticorpi anti Nucleo vedi ANA									
Anticorpi anti pro-trombina (IgG e IgM)								Non richiedibile	
<i>Anticorpi anti pneumococco</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Non richiedibile per esterni SOLO per interni	
Anticorpi anti Picorna virus vedi PICORNA VIRUS									

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
Anticorpi anti Polio virus vedi POLIO VIRUS									
Anticorpi anti Psittaci vedi CHLAMYDIA PSYTTACI Ab									
Anticorpi anti Reticolina vedi RETICOLINA Ab									
Anticorpi anti Sacaromices vedi ASCA									
Anticorpi anti Streptolisina vedi TAS									
Anticorpi anti 21 OH								Non richiedibile	
Anticorpi anti Surrene ICA									
Anticorpi anti Tireotropina vedi TSH recettore									
Anticorpi anti Tiroide vedi TIREOPEROSSIDASI Ab									
Anticorpi anti Trypanosoma vedi TRYPANOSOMA Ab									
<i>Anticorpi anti Yersinia enterocolitica</i>	<b>NO COD</b>			Synlab	Sr	bianca piccola			Synlab esegue SOLO BLOT: IgA e IgG di conferma.
Anticorpi MAG vedi MAG (Glicoproteina associata alla mielina)	<b>MAG</b>	<b>419</b>	<b>MAG</b>	BR Np	Sr	Ruggine Piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
ANTIDIURETICO ORMONE (Vasopressina o ADH)								Non richiedibile	
Antigene Carcinoembrionale vedi CEA									
Antigene Epatico solubile vedi SLA									
Antigene Legionella su urine vedi LEGIONELLA									
Antigene PP65 vedi CITOMEGALOVIRUS Ricerca con metodo PCR (DNA)								Per la diagnosi di infezione da CMV non si esegue la ricerca dell'antigene PP65 ma si ricerca il DNA virale con metodo PCR.	
ANTISTREPTOLISINA anticorpi vedi TAS									
ANTITROMBINA	<b>A3</b>	<b>300</b>	<b>COAG</b>	SB	PI	azzurra piccola			
APC RESISTANCE (resistenza alla proteina C attivata)	<b>ACPR</b>	<b>002</b>	<b>TROMB</b>	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare 10' a 3600 sierare e congelare a -20°C
APCA (anticorpi anti cellule parietali gastriche)	<b>APCA</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
APOLIPOPROTEINA A	<b>APOA</b>	<b>003</b>	<b>CHIMM</b>	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
APOLIPOPROTEINA B	APOB	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
APTOGLOBINA	APTG	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ASCA (Saccaromyces cerevisiae anticorpi)	ASCA	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ASMA (anticorpi anti muscolo liscio)	ASMA	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ASPERGILLUS anticorpi IgG	ASPER	230	ASPER	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
ASPERGILLUS N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Sr	bianca piccola			Se non è possibile inviare in giornata congelare a -20° e spedire congelato. Viene eseguito anche su broncolavaggio. Chiamare BTm per eventuali informazioni sulla conservazione del campione.
ASSETTO EMOGLOBINICO	ASSET	007	ASSET	Legnago	Sg	viola piccola			
AVIDITY CITOMEGALO	CITOA	672	VIDAS	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
AVIDITY TOXO	TOAVG	672	VIDAS	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
BAL (liquido di lavaggio broncoalveolare)	BAL	290	BL/AS	Legnago	Mb	vasetto sterile		travasare in rapporto 1:1 in provetta dedicata	Campione frigorifero n. 3 supporto per Legnago
BARBITURICI siero vedi FENOBARBITAL									
BARBITURICI urine N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD					U-ARA		Solo come urgenza inviare a BR	
BARTONELLA (Henselae) anticorpi IgG IgM	ABART	542	ABART	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
BCL1/IgH2 Riarrangiamento genetico	BCL1	221	BIOLM	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	NON serve appuntamento	
BCL2/IgH2 Riarrangiamento genetico	BCL2	221	BIOLM	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	NON serve appuntamento	
BCR/ABL	BCRAB	221	BIOLM	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30	Il paziente DEVE consegnare il modulo di richiesta da parte del reparto Oncologia di San Bonifacio	
BENZODIAZEPINE Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	BENZO	040	DAU-A	SB	Ur	U-ARA		Fa parte del profilo DRO (per urgenza: vedi droghe urine) Richiedere CREAM se viene richiesto singolarmente	
BENZENE I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD					provetta apposita fornita da medicina del lavoro		Accettiamo solo le ditte convenzionate con noi. Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
BETA D-GLUCANO	BGLUC	433	BGLUC	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
BETA 2 GLICOPROTEINA 1 anticorpi	AB2GP	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
BETA 2 MICROGLOBULINA	B2MIC	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
BILIRUBINA (tot. e fraz.)	BILI	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola		Si esegue la bilirubina diretta, se bilirubina tot >1,1 mg/dL	
BK ESCREATO (colturale e diretto)	EBK	570	EBKBT	Synlab	Mb	2 vasetti sterili (min. 5 mL di campione)			Campione frigorifero n°3
BK ESCREATO (Urine)	UBK	571	UBKBT	Synlab	Mb	2 vasetti sterili (min. 40 mL di campione)			Campione frigorifero n°3
BK MATERIALI DIVERSI (colturale e diretto)	BK	572	BKBT	Synlab	Mb	2 vasetti sterili (min. 2 mL di campione)		<b>specificare sempre il tipo di materiale (non eseguibile su Feci)</b>	Campione frigorifero n°3
BK -DNA	TBC		BKDNA		Mb	Vasetto sterile (Tappo rosso) (min. 2 mL di campione)		Escreato	Metodica certificata su escreato.
<i>BKV - DNA N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRm	Sr + Urine	VIOLA grande	Entro h 7.30	Biologia Molecolare (settore microbiologia) Dr.ssa Boaretti 045/8128289	
BNP (Peptide natriuretico B)	BNP	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
BORRELIA BURGENDORFERI anticorpi (mal. di Lyme) IgG IgM	ABORR	388	ABORR	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>BORRELIA BURGENDORFERI ricerca con metodo PCR N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRm		VIOLA grande	Consegna campione SOLO dal Lunedì al Giovedì	<b>Esame di 2° livello, da concordare con il laboratorio microbiologia BR Tel. 045 8128289</b>	Conservare in frigo n. 3
<i>BROMODEOSSOURIDINA N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRpe	Sm	Siringa eparinata		3 ml di sangue midollare in siringa eparinata	Spedire in Clinica Ematologica BR tel 045 8124559
BRUCCELLA anticorpi (IgG, IgM)	ABRUC	538	ABRUC	BT	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA'</i>	<b>NO COD</b>			Synlab	PI	azzurra piccola		Centrifugare entro 30 minuti dal prelievo a temp. Ambiente	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
C 1 INATTIVATORE	C1IN	872	C1INB	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CA 125	CA125	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CA 15.3	CA153	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CA 19.9	CA19.9	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<i>CADMIO</i> <i>Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Esame solo per DITTE accettate dal Laboratorio	
CALCIO	<b>CA</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola			
CALCIO e FOSFORO su urine 2 minzione	<b>URI2</b>	<b>900 905</b>	<b>CHIMM URI2</b>	SB	PI Ur 2 minz	verde piccola + Provetta U_VERDE urine		Si esegue anche Ca, P e creatinina su sangue e Creatinina su urine	
CALCIO IONIZZATO	<b>CAION</b>	<b>118</b>	<b>CA</b>	SB	PI	verde scuro piccola		NON aprire tappo provetta	
CALCIO urine 2° minzione esegue Calciuria e Creatinuria	<b>CAU2</b>	<b>905 900</b>	<b>URI2 CHIMM</b>	SB	Ur 2 minz	U-VERDE verde piccola		Si esegue anche creatinina su sangue e Creatinina su urine .	
CALCIO urine 24h	<b>CAU</b>	<b>902 017</b>	<b>ChUri DIUcc</b>	SB	Ur 24h	bidone + 5 mL HCl 32% (prima della raccolta) 2 provette U_ROSSO + diuresi			
CALCIO urine 8-20 (ORTO) CALCIO urine 20-8 (CLINO)	<b>CA820 CA208</b>	<b>593 594</b>	<b>ChUri DIUcc</b>	SB	Ur 24h	bidone + 5 mL HCl 32% (prima della raccolta) 2 provette U_ROSSO + diuresi			
CALCITONINA	<b>CAH</b>	<b>346</b>	<b>IMMUL</b>	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
CALCOLI URINARI	<b>CALC</b>	<b>313</b>	<b>CALC</b>	Synlab	Mb	Vasetto sterile			Eseguire esame macroscopico nel settore urine e successivamente spedire al SYNLAB
CALPROTECTINA	<b>CALPR</b>	<b>800</b>	<b>CALPR</b>	Bussolengo	Feci	vasetto sterile conservare in frigorifero			Trasferire una piccola quantità di feci in provetta apposita, vortexare e conservare in frigoriferon°3
CANALI DEL CALCIO Ab								Non eseguibile	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
CANNABINOIDI Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	CANNA	040	DAU-A	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREAU se viene richiesto singolarmente	
Capacità ferroleghante vedi TIBC									
CARBAMAZEPINA	CARBA	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
CARBOSSIEMOGLOBINA NO Centri Prelievi periferici	COHB	041	SGAS*	SB	Sg	siringa eparinata	A freddo	NO Centri Prelievi periferici Consegnare campione subito in Laboratorio a FREDDO	
CARDIOLIPINA anticorpi (IgG/M)	ACLS	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
CARIOTIPO oncologico NON per ESTERNI	CARIO	918	CARIO	BR	Mb Sg	Sangue Midollare in verde piccola fornita da BR	Entro h 7.30 + Modulo NO litio eparina	SOLO per DH ONCOLOGIA e MEDICINA Su APPUNTAMENTO tel 045 8128266	
CARIOTIPO fetale N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			Brgen		vasetto sterile		Arriva dalla ginecologia barattolino con cute fetale sospesa in soluzione fisiologica. Inviare presso Genetica BR	
CARIOTIPO per X FRAGILE Il paziente deve rivolgersi personalmente a BR N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							BR con appuntamento tel. 045 8124512 oppure 045 8121212	
CATECOLAMINE PLASMATICHE (adrenalina-noradrenalina-dopamina) NO Centri Prelievi periferici	CATEP	414	CATE*	Synlab	PI	VIOLA grande	Centrifugare a freddo entro 30' dal prelievo	specificare sulla richiesta se adrenalina,noradrenalina o dopamina	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
CATECOLAMINE URINE (adrenalina - noradrenalina)	CAT	493 017	uCAT DIUcc	Synlab	Ur 24h	bidone + 5 mL HCl 32% (prima della raccolta) 2 provette U_ROSSO + diuresi			Campione frigorifero n°3
CATENE LEGGERE LIBERE SU SIERO	FLCK FLCL RFLC	010	NEFEL	SB	Sr	TRASPARENTE grande			
CDT (Transferrina desialata)	CDT	540 541	CDT	SB	Sr	ruggine piccola		Segnare n° carta identità su apposito modulo, firmare la provetta sia paziente che prelevatore	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
CEA (antigene Carcinoembrionario)	CEA	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CELIACHIA -biologia molecolare	DQ2Q8	383	DQ2Q8	Synlab	Sg	VIOLA grande			Campione frigorifero n°3
CERULOPLASMINA	CERUL	006	bianc CERUL	Synlab	Sr	bianca piccola			Campione frigorifero n°3
<i>CICLOESANO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
CISTATINA URINARIA								Non richiedibile	
<i>CISTICERCOSI W blot</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>				Negrar	Sr	OCRA grande		Negrar Malattie Tropicali tel. 045 6013311 Centrifugare, sierare, è possibile conservare a +4° per alcuni giorni
<i>CISTICERCOSI Ab</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>				BTm	Sr	bianca piccola		Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CHARCOT-MARIE ricerca gene	CHARC	141	CHARC	BRnp	PI	VIOLA grande 3 provette	Entro h 7.30 A freddo	Dal lunedì al giovedì. Richiedibile SOLO da Neurologia S.Bonifacio. Consenso informato del paziente.	
CHETONI URINE	UACE	810 017	U-ACE + prov. DIUcc	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi		(determinazione semiquantitativa corpi chetonici)	
CHIKUNGUNYA anticorpi	CHIKU CHIM	249	CHIKU	Padova	Sr Urine Sg	2 rossa piccola 2 urine sterili 2 viola piccola	Da inviare entro 72h	Eseguire un duplicato delle etichette	Centrifugare provetta rossa, frigorifero n°3 compilare allegato <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
<i>CHILOMICRONI</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>				BR	Sr	ruggine piccola		Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CHLAMYDIA PNEUMONIAE Ab	ENTE6	703	APNEU	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CHLAMYDIA PSYTTACI Ab	ENTE7	703	APNEU	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ab	ACLA	534	ACHLA	Synlab	Sr	bianca piccola		ACLA 1 - Igg ACLA 2 - Igm	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>CHLAMYDIA TRACHOMATIS</i> <i>ricerca DNA</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRm	Mb	Tampone o vasetto sterile	Tampone cervicale e/o vaginale/tamp. rettale/tamp. faringeo/liquido seminale/urine	Esame di 2° livello, da concordare con il laboratorio microbiologia BR Tel. 045 8122461	Per materiali diversi da quelli indicati, prendere accordi con la microbiologia di Borgo Roma.
<i>CFTR Mutazione gene fibrosicistica</i> <i>indirizzare paziente a genetica B.R.</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BT (Patologia Molecolare Lab. Analisi)	Sg	2 VIOLA grande (per il neonato è sufficiente 1 ml in EDTA)	Modulo di accompagnamento	Dott. Bonizzato 045 8123492	La richiesta deve essere fatta <b>solo dopo consulenza genetica</b> . Il paziente esterno deve andare direttamente a BT
CICLOSPORINA: determinazione quantitativa	CICLO	451	CICLO	SB	Sg	viola piccola			<b><u>NON CENTRIFUGARE</u></b>
CISTATINA C	CISTA	010	NEFEL	SB	Sr	TRASPARENTE grande			
CITOGENETICA vedi CARIOTIPO oncologico									
CITOMEGALOVIRUS su urine metodo PCR (DNA)	UCMV	510	UCMV	Legnago	Ur	vasetto sterile			Campione frigorifero n°3
CITOMEGALOVIRUS Ab	CITO	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CITOMEGALOVIRUS avidità IgG	CITOA	672	VIDAS	Legnago	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	
CITOMEGALOVIRUS ricerca con metodo PCR (DNA)	CITOB	527	AgCMV	Legnago	Sg	VIOLA grande			Campione frigorifero n°3
<i>CITOMEGALOVIRUS ricerca con metodo PCR (DNA)</i> <i>Il paziente ESTERNO deve rivolgersi personalmente a BR</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRm	Liquor/ Liquido amniotico/ sangue intero K2 EDTA/ urine	Provetta apposita per Liquor/vasetto sterile/ VIOLA grande/ contenitore sterile per urine		NO COLTURA Inviare paziente a BR.	Non viene eseguito su saliva.
CITOPLASMA NEUTROFILI anticorpi vedi ANCA Ab									
CITRATO URINE	CITRA	960 017	uCITR DIUcc	Synlab	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			Campione frigorifero n°3
CITRULLINA Ab	AACIT	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
CK (creatina fosfochinasi)	CK	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
COLORO	CL	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
COLORO urine 24h	CLUU	902 017	ChUri DIUcc	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ricerca della tossina (TACD)	TACD	537	TACD	SB	Feci	contenitore sterile tappo rosso		Il campione deve arrivare in laboratorio entro 24 ore	
CLOZAPINA	CLOZA	701	CLOZA	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>RICERCA CLONE ENP</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	Sr	2 provette VIOLA grande	Entro h 7.30	Per emoglobinuria parossistica notturna su sangue periferico	francesca.zampieri@aovr. veneto.it Tel: 045/8128412 COD:91.47.A_2 033133
<i>COBALTO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi</i> <i>personalmente alla Medicina del Lavoro</i> <i>B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRml				Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
COCAINA Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	COCA	040	DAU-A	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREAU se viene richiesto singolarmente	
COFATTORE RISTOCETINICO	FW01	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola		Automaticamente viene richiesto anche il fattore Von Willebrand e fattore VIII	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
COLLAGENE 7°								Non richiedibile	
COLESTEROLO TOTALE	COL	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
COLINESTERASI	CHE	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Campione frigorifero n°3
COMPLEMENTEMIA C3	C3	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Campione frigorifero n°3
COMPLEMENTEMIA C4	C4	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Campione frigorifero n°3
COOMBS DIRETTO (test di)	TCD	025	TCD	SBct	Sg	FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>	Frigorifero n. 3 su apposito supporto se il campione arriva quando il Trasfusionale è chiuso
COOMBS INDIRETTO (test di)	TCI	089	TCI	SBct	Sg	FUCSIA grande	Modulo	<b>Firmare la provetta</b>	Frigorifero n. 3 su apposito supporto se il campione arriva quando il Trasfusionale è chiuso

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
COPEPTINA	COPEP	323	COPEP	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. a -20°.
COPROCOLTURA ( Salmonella - Shighella e Campylobacter)	FMI	211	FMI	Legnago	Feci	T. Verde			
COPROLEUCOCITI								Non si esegue, sostituito da CALPROTECTINA	
COPROPORFIRINE URINARIE Vedi Porfirine Urinarie Totali ( UPORF)	UPORF							Compreso nel pannello UPORF	
CORTISOLO mattino	CORT	710	CORT	Legnago	PI	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
CORTISOLO ore 18,00	CORTP	622	CORTP	Legnago	PI	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
Cortisolo urinario libero	CORTU	613 017	CORTU DIUcc	Legnago	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi+10g ac.borico		Acidificare con acido borico.	Provetta frigorifero n°3
COXIELLA BURNETII Ab	COXIE	707	COXBU	Synlab	Sr	bianca piccola		Fase I ( viene eseguita solo se IgG fase II sono >90	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
COXIELLA BURNETII Ab	COXBU	707	COXBU	Synlab	Sr	bianca piccola		Fase II - Risultato IgM	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
COXSACKIE VIRUS Ab	AACOX	394	AACOX	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
C-PEPTIDE	CPEP	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
C-PEPTIDE CURVA dopo GLUCAGONE								Non richiedibile	
C-PEPTIDE post prandiale	CPOST	284	CPOST	Legnago	Sr	ruggine piccola		Prelievo 2 ore dopo il pasto	Centrifugare, cong. n° 5 a -20°
CREATININA	CREA	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
CREATININA Su liquido peritoneale	CRELP	917	LqSI			provetta U_ROSSO			
CREATININA urine 24h	CREAU	902 017	ChUri DIUcc	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
CREATININA-CLEARANCE	CREAC	900 902 017	CHIMM ChUri DIUcc	SB	Ur 24h + PI	provetta U-ROSSO Raccolta bidone con diuresi + verde piccola			
CRIOGLOBULINE NO Centri Prelievi periferici	CRIO	048	37°C 3 provet.	SB	Sr	BLU grande	3 provette a 37° C chiedere il contenitore per trasporto e provette in laboratorio		NO sabato e giorni prefestivi
CRIOGLOBULINE tipizzazione NO Centri Prelievi periferici	CRIO	048	37°C 3 provet.	SB	Sr	BLU grande	3 provette a 37° C chiedere il contenitore per trasporto e provette in laboratorio		NO sabato e giorni prefestivi
CRIPTOCOCCO	CRIP	487	CRIP	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
<i>CROMO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRml				Solo per Ditte gestite direttamente dal Laboratorio Analisi. Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
CROMOGRANINA	CROMO	333	CROMO	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
CTX SIERICO	CTX	425	CTXTG	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
CYFRA 21-1	CYFRA	325	CYFRA	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
CUTE N.B. SOLO PER INTERNI	CUTE	614	CUTE	BRlp	Sr	ruggine piccola		SOLO PER INTERNI Il codice contiene Ab BP180-Ab + BP 230 + Ab Desmogleina G1 e Ab Desmogleina G3	Se prelievo di venerdì o sabato congelare siero cong. N° 5 a -20°
D-DIMERO	XDP	005	DD	SB	PI	azzurra piccola			
DECARBOSSILASI DELL'ACIDO GLUTAMMICO vedi GADA									
DELTA AMINOLEVULINICO ACIDO vedi ALA									
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	D4A	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
DENGUE anticorpi	DEN DEM	249	SIERL	Padova	Sr Urine Sg	2 rossa piccola 2 urine sterili 2 viola piccola	Da inviare entro 72h	Eseguire un duplicato delle etichette	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 compilare allegato <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
Depakin vedi VALPROICO acido									
DESMOGLEINA vedi CUTE N.B. SOLO per interni									
DHEA-S: deidroepiandrosterone solfato	DHEAS	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
<i>DICLOROMETANO</i> Il paziente <b>ESTERNO</b> deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>							Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
DIFTERITE Ab	ABDIF	875	ABDIF	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
DIGOSSINA	DIG	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola		Prelievo consigliato dopo 6 ore dall'ultima dose di farmaco	
Diidrotestosterone vedi TESTOSTERONE libero									
DISTROFIA MUSCOLARE ricerca mutaz. in Biol.Molec.	DISTR	221	BIOLM	BR	Sg	VIOLA grande	Modulo		
DNA Ab	ABDNA	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
DPYD MUTAZIONE Richiedibile SOLO da Oncologia SB	DPYD	144	DPYD	Padova		VIOLA grande	<b>Nel buono mettere Timbro per la spedizione risposta all'ONCOLOGIA</b>	Richiesto SOLO da oncologia SB Parte il Giovedì	Frigorifero n. 3 in sacchetto con buono di spedizione <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
DROGHE urine (determinazione semiquantitativa) Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	DRO	040	DAU-A	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Comprende i metaboliti di: cocaina, amfetamine, cannabinoidi, benzodiazepine, metadone. MDMA Richieder sempre creatinuria	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
DSG1 DSG3 vedi CUTE (N.B. SOLO PER INTERNI)									
DUO TEST Esame inserito SOLO da Segreteria		768	DUO	Legnago	Sr	OCRA grande			2 Provette per ogni paziente (una da spedire , una da conservare a -20°)
EBV DNA SANGUE	SEBV	408	SEBV	Legnago	PI	VIOLA grande		no sabato	
ECHINOCOCCO anticorpi IgG	ECHIN	472	ECHIN	Synlab	Sr	bianca piccola		Vengono eseguite SOLO le IgG Borgo Trento esegue SOLO il BLOT	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ECP								Non richiedibile	
ECHOVIRUS								Non richiedibile	
<i>EGFR gene mutazione</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								Richiesta per Anatomia Patologica
ELASTASI FECALE	ELA	439	ELA	Synlab	Feci	vasetto sterile		Basta una noce di feci	Campione frigorifero n°3
ELETTROFORESI PROTEICA	ETF	043 064	ETF CHIMM	SB	Sr	2 provette tappo rosa piccola		vengono eseguite anche proteine totali	
ELETTROFORESI URINARIA	UETF	.044	U-Bj	SB	Ur	provetta U-VERDE		Un campione urine 1a minzione	1 goccia di Na azide nelle urine
ELETTROLITI (Na, K, Cl)	ELE	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
ELETTROLITI urine (Na, K, Cl)	ELEU	902 017	ChUri DIUcc	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
EMOCROMATOSI (ricerca mutazioni genetiche in biologia molecolare)	EMOCR	750	MUTAZ	Synlab	Sg	VIOLA grande	+ Modulo		
EMOCROMO SENZA FORMULA	EU	145	EU	SB	Sg	lilla piccola			
EMOCROMO a caldo (37 °C) <b>NO Centri Prelievo periferici</b>	EF	145	EF	SB	Sg	lilla piccola richiedere il contenitore e il materiale termostatati in laboratorio		Eseguibile solamente nella sede di San Bonifacio	Consegnare il prima possibile in settore Ematologia
EMOCROMO CON FORMULA	EF	145	EF	SB	Sg	lilla piccola			
EMOCROMO in Sodio Citrato	EFC	110	EF	SB	Sg	azzurra piccola + lilla piccola		mettere in un sacchettino le 2 provette , scrivere ATTENZIONE Emocromo in Sodio Citrato	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
EMOGASANALISI ARTERIOSA NO Centri Prelievi periferici	EGSAR	041	SGAS*	SB	Sg	siringa eparinata	A freddo	Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti <b>NON ESEGUIBILE DA ADI</b>	
EMOGASANALISI VENOSA NO Centri Prelievi periferici	EGSVE	041	SGAS*	SB	Sg	siringa eparinata	A freddo	Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti <b>ESEGUIBILE DA ADI</b>	
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	HBG	920	HBG	Legnago	Sg	viola piccola			
EMORRAGIA (Tempo di )								sostituito da PFA100 (comprende anche EF)	
ENA (Ab anti nucleo estraibili)	EN	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ENA CENP-B	EN10	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
ENDOMISIO (Esame di 2° Livello - vedi TTG + IMM52)	AENDO	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello - Si esegue se TTGA positiva	
ENOLASI NEURONE SPECIFICA vedi NSE									
ENTEROVIRUS anticorpi IgG-IgM	ENTER	705	AACOX	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>ENTEROVIRUS ricerca in PCR</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRm	Sg/Liquor	VIOLA grande/provetta apposita per liquor			Per materiali diversi da quelli indicati, prendere accordi con la microbiologia di Borgo Roma.
EOSINOFILI Proteina cationica vedi ECP								Non richiedibile	
EPATITE A	HAV	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande		Si eseguono AB totali Altrimenti con codici CVP appositi si possono richiedere separatamente IgG e IgM se si sospetta una infezione acuta (secondo circolare ministeriale n°224903 del 28/05/2013)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi contro l'antigene di superficie	HBSAB	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi anti envelope E del virus	HBEAB	420	VIROL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi IgM verso l'antigene core	HBCM	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
Epatite B: determinazione qualitativa degli anticorpi verso l'antigene core totali	HBCAB	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
EPATITE B: determinazione qualitativa dell'antigene di superficie dell'epatite B	HBSAG	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
Epatite B: determinazione qualitativa dell'antigene E del virus	HBEAG	420	VIROL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
EPATITE C: determinazione qualitativa degli anticorpi totali	HCV	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ERITROPOIETINA	ERPOI	003	CHIMM	Legnago		OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
EPSTEIN BARR VIRUS anticorpi mononucleosi	EBV	294	SIERL	Legnago	Sr	ROSSA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
EPSTEIN BARR VIRUS (PCR)	SEBV	408	S-EBV	Legnago	PI	VIOLA grande			Provetta frigorifero n°3
<i>EMOSIDERINA urine</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	Ur 1minz	Provetta U-VERDE			
<i>ENTAMOEBA HISTOLYTICA anticorpi</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>ESANEDIONE 2-5</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>ESANO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>EPARINA anticorpi</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTct	Sr	OCRA grande	<b>Sospendere Eparina almeno 48 ore prima</b>	<b>Solo su appuntamento al ct BT tel. 045 8122149</b>	
<i>EPARINA dosaggio</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	PI	azzurra piccola		Accordo con laboratorio BR tel. 045 8124516	
ESTERASI INIBITORE vedi C1 inibitore									

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ESTRADIOLO (17 beta OH) (E2)	ESTRA	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ETOSUCCIMIDE	ETOS	122	ETOSU	Synlab	Sr	BLU grande			Centrifugare, sierare, congelare a -20°
EVEROLIMUS (Certican)	EVERO	962	EVERO	Synlab	Sg	viola piccola			Provetta frigorifero n°3 (non centrifugare)
FALCIZZAZIONE test Esame di 2° Livello - Inserito direttamente dal Laboratorio				Legnago	Sg	viola piccola		Viene eseguito in base ai valori dell'esame ASSET	
FARLEY test di No centri prelievi Periferici	FAR	077	FAR	SB	Ur	provetta U_VERDE		Deve arrivare in laboratorio entro 30' dalla minzione	
FATTORE II diverso da ricerca MUTAZIONE FATTORE II	FII	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE V diverso da ricerca MUTAZIONE FATTORE V	FV	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE VII	FVII	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE VIII	FVIII	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE IX	FIX	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE X	FX	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE XI	FXI	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE XII	FXII	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE VON WILLEBRAND	FW01	268	FATT	Legnago	PI	azzurra piccola		Automaticamente viene richiesto anche il Cofattore Ristocetinico e fattore VIII	Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. -20°
FATTORE INTRINSECO Ab	AFI	280	AFI	SB	Sr	OCRA grande			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
FATTORE NATRIURETICO ATRIALE vedi BNP									
FATTORE REUMATOIDE	RF	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
FATTORE V di LEIDEN vedi MUTAZIONE FATTORE V FENILALANINA									
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD							Si esegue a PD:malattie metaboliche	
FENILGLIOSSILICO ACIDO <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>									
FENITOINA (dintoina)	FENIT	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
FENOBARBITAL (gardenale)	FENOB	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
Fenotipo RH	KELL	087	GRP	SBct	PI	FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>	
FERRITINA	FERRI	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
FERRO	FE	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
FIBRINOGENO	FIBR	300	COAG	SB	PI	azzurra piccola			
FIBROSI CISTICA vedi CFTR									
FIBROSI CISTICA mutazioni vedi CFTR	NO COD								
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>									
FLUORO <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>									
FK-506 ( TRACOLIMUS)	FK506	121	FK	SB	Sg	viola piccola			NON CENTRIFUGARE
FORMAMMIDE MONOMETIL <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>									
FOLATI (acido folico)	FOLAT	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	ALP	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
FOSFATASI ALCALINA OSSEA	FAO	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
FOSFOLIPIDI Ab sostituito con CARDIOLIPINA Ab									
FOSFORO	P	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
FOSFORO 2° minzione	URI2	900 905	CHIMM URI2	SB	Ur 2 minz	Provetta U-VERDE + verde piccola		Comprende la ricerca di Fosforo urinario/sierico, Creatinina urinaria/sierica e Calcio urinario/sierico.	
FOSFORO urine	PU	017 902	DIUcc ChUri	SB	Ur 24h	bidone + 5 mL HCl 32% (prima della raccolta) 2 provette U_ROSSO + diuresi			
FRANCISELLA TULARENSIS								Non richiedibile	
FSH	FSH	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
FT3 (triiodotironina libera)	FT3	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
FT4 (tiroxina libera)	FT4	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
G6PD (glucosio 6 fosfato deidrogenasi)	G6PD	587	G6PD	Synlab	Sg	VIOLA grande			Provetta frigorifero n°3 (non centrifugare)
GADA Anticorpi anti Decarbossilasi acido glutammico	GADA	220	DIAB	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, congelatore n° 5 a -20°
GALATTOMANNANO su siero	GALAT	423	GALAT	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
GALATTOMANNANO su urina	GALAU	462	GALAU	BTm	Ur	vasetto sterile			Cong. n° 5 a -20°
GALATTOMANNANO su bronco aspirato	GALAB	471	GALAB	BTm	Mb	vasetto sterile			Cong. n° 5 a -20°
GASTRINA	GA	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
GANGLI anticorpi (anti GM1) N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Sr	TRASPARENTE grande	+ Modulo con indicazione del sospetto clinico	Compreso nel pannello Gangliosidi	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<b>GANGLIOSIDI</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRnp	Sr	TRASPARENTE grande	+ Modulo con indicazione del sospetto clinico		Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
<b>GENTAMICINA</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			PD	Sr	TRASPARENTE grande			<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
GENTAMICINA POST DOSE								Non eseguibile	
GGT (gamma glutamil transpeptidasi)	<b>GGT</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola			
GH vedi Somatotropina ormone									
<b>GIARDIA</b>	<b>GIARD</b>	<b>311</b>	<b>GIAR</b>	Legnago	Feci	vasetto sterile			Campione frigorifero n°3
GLIADINA deaminata anticorpi	<b>AGA</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
GLUCOSIO urine	<b>GLUU</b>	<b>017 902</b>	<b>DIUcc ChUri</b>	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
GLUCOSIO	<b>GLU</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola			
<b>GLUCAGONE</b> <i>Indirizzare i pazienti ESTERNI a PD</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			PD				B. Trento non lo esegue più	Viene fatto in laboratorio centrale a PD <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
GLUCOSIO CURVA da abbinare SEMPRE a INSULINA CURVA	<b>OGTT INSUC</b>	<b>028 031 029 931 032 033</b>	<b>GLU00 GLU30 GLU60 GLU90 GL120</b>	SB	PI	grigia piccola	BASE 30' 60' 90' 120'	75 g di glucosio comprende anche curva insulinemica.	
GLUCOSIO CURVA dopo carico di GLUCOSIO (OGTT)	<b>CURVA</b>	<b>028 031 033</b>	<b>GLU00 GL120</b>	SB	PI	grigia piccola	BASE 120'	Adulti 75 g di glucosio Bambini 1,75 g gluc/Kg di peso (max.dos. 75 g.)	
GLUCOSIO CURVA dopo carico in gravidanza	<b>CURVG</b>	<b>928 031 931 933</b>	<b>GLU00 GLU60 GL120</b>	SB	PI	grigia piccola	BASE 60' 120'	75 g di glucosio	
GLUCOSIO in L-L acetato	<b>GLUGG</b>	<b>908</b>	<b>GLGG</b>	SB	PI	grigia piccola			L' anticoagulante L-L acetato mantiene il valore del glucosio nel campione stabile per 3 giorni

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<i>GRANULOCITI anticorpi</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente a BTct</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTct				<b>Previo appuntamento a BT ct</b> <b>Tel. 045 8122149</b>	
GRUPPO SANGUIGNO E FENOTIPO RH	<b>GRH</b>	<b>266</b>	<b>GRH</b>	SBct	Sg	FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>	
GRUPPO SANGUIGNO + FENOTIPO RH + Kell + COOMBS indiretto	<b>GRHC</b>	<b>266</b>	<b>GRH</b>	SBct	Sg	2 provette FUCSIA grande		<b>Firmare le provette</b>	
GRUPPO SANGUIGNO FUNICOLO + FENOTIPO RH funicolo + COOMBS diretto	<b>GRHF</b>	<b>087 028</b>	<b>GRP TCD</b>	SBct	Sg	FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>	
H1N1 virus influenza suina	<b>TH1N1</b>	<b>993</b>	<b>VH1N1</b>	Padova	Mb	Tampone rosso		<b>Previo accordo con fattorini</b> <b>( inviare entro 24h)</b>	<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498218830/ 0498218851</b> Conservare in frigo. (NO SABATO)
H63D vedi EMOCROMATOSI									
HBV DNA QUANTITATIVO (carica virale)	<b>HBVQ</b>	<b>363</b>	<b>QHBV</b>	Legnago	PI	BIANCA grande	Provetta con gel e K2 EDTA	ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita, se sprovvisti, con la provetta bianca piccola!	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)
AB HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	<b>HAEMO</b>	<b>143</b>	<b>HAEMO</b>	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
HCG (totale + beta)	<b>HCG</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola		In accettazione indicare se in gravidanza (1) o non in gravidanza. (0)	Se donna in età fertile indicare mese di gravidanza 1 se non si conosce. Se uomo o donna NON in età fertili indicare come mese di gravidanza 0 (zero ). Importante perché cambiano i valori di riferimento

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
HCV GENOTIPO (tipizzazione genomica)	HCVT	364	QHCV	Legnago	PI	BIANCA grande	Provetta con gel e K2 EDTA	ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita, se sprovvisti, con la provetta bianca piccola!	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)
HCV RNA quantitativo (carica virale)	HCVQ	364	QHCV	Legnago	PI	BIANCA grande	Provetta con gel e K2 EDTA	ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita, se sprovvisti, con la provetta bianca piccola!	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)
HDL-COLESTEROLO	HDL	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
HDV anticorpi (epatite delta anticorpi)	HDVAB	473	HDVAB	Synlab	Sr	bianca piccola		Se HBsAg non reattivo inserire commento " Non si esegue data la non reattività' del test HBsAg"	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
HDV delta RNA (epatite delta antigene)	HDVRN	452	HDVRN	Synlab	Sg	VIOLA grande		Se HBsAg non reattivo inserire commento " Non si esegue data la non reattività' del test HBsAg"	Provetta frigorifero n°3
HE4 indirizzare paziente a BR								Non richiedibile	
HELICOBACTER PYLORI Ab	AHP	294	SIERL	Legnago	Sr	ROSSA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
HELICOBACTER PYLORI antigene	HELIC	386	HELIC	Legnago	Feci	Vasetto sterile			Campione frigorifero n°3
HERPES ZOSTER vedi VARICELLA ZOSTER Ab									
HERPES SIMPLEX: ricerca anticorpi IgM e IgG 1 e 2	HERP0 HERP1 HERP2	874	HERPE	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
HERPES SIMPLEX coltura								Non richiedibile	BTm non la esegue
HERPES SIMPLEX ricerca nel sangue con metodo PCR  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRm	Sg K2EDTA/ Liquor/ Vescicole	VIOLA grande/ Provetta per Liquor/ liquido vescicole raccolto con tampone floccato		Esame di 2° livello contattare il laboratorio BRm tel. 0458124720	La ricerca può essere effettuata su sangue intero oppure su liquor o sul liquido delle vescicole.
HEV Indirizzare pazienti ESTERNI a PD microbiologia  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD				Microbiologia PD tel. 04982179148/15	<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
HEV IgG/IgM N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			Brm	Sr	OCRA grande		Inserire numero telefonico del medico richiedente( verrà contattato per fornire dati anamnestici del paziente). Tel. Az. Osp. 045-8122394 / 3305	Stabile fino a 72h in frigo , poi congelare.
HFE c282y/ h63d vedi EMO Cromatosi									
HMGR anticorpi	HGCMR	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
HIV RNA quantitativo (carica virale)	HIVQ	365	Q-HIV	Legnago	PI	BIANCA grande		ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita, se sprovvisti, con la provetta bianca piccola!	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)
HIV: determinazione qualitativa di antigeni e anticorpi	HIV	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
HIV: anticorpi con metodo Western Blot Esame di 2° Livello - Inserito direttamente dal Laboratorio				Legnago	Sr	OCRA grande		<b>Viene eseguito in base ai valori dell'esame HIV</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
HLA B27 Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in <u>Segreteria</u>	HL27	391	HLB27	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30 Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)
HLA completo I° + II° classe Comprende HLAB + HLAC + HLAB51 Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in <u>Segreteria</u>	HLA	336	HLA	BTct	Sg	2 provette VIOLA grande	Entro h 7.30 Allegare fotocopia impegnativa Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281	NON CENTRIFUGARE(Bambini : 1 provetta VIOLA GRANDE) (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)
HLA B57	HLB57	131	HLB57	Synlab	Sg	VIOLA grande			NON CENTRIFUGARE
HNPP fenotipo /CMM N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			Brnp	Sg	3 VIOLA grande	Entro h 7.30 Allegare fotocopia impegnativa	Indicare il sospetto clinico	Trasporto dei campione <b>NON</b> a freddo
HOMA test	HOMA	900 003	CHIMM IMMUL	SB Legnago	PI Sr	verde piccola ruggine piccola		Calcolo Glucosio ed Insulina	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ICA vedi Insula Pancreatica									
<b>IDROSSIPIRENE</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
IDROSSI TRIPTAMINA 5 vedi SEROTONINA									
IDROSSICOLECALCIFEROLO 25 vedi VITAMINA D									
IDROSSIINDOLACETICO ACIDO (ACIDO 5-OH INDOLACETICO)	<b>5IDRO</b>	<b>17 393</b>	<b>DIUcc 5IDRO</b>	Synlab	Ur 24h	bidone + 5 mL HCl 32% (prima della raccolta) 2 provette U_ROSSO + diuresi			Campione frigorifero n°3
IgE SPECIFICHE Alimenti	<b>ADU01</b>	<b>265</b>	<b>ALLER</b>	Legnago	Sr	OCRA grande		Fotocopia impegnativa	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
IgE SPECIFICHE Inalanti	<b>ADU02</b>	<b>265</b>	<b>ALLER</b>	Legnago	Sr	OCRA grande		Fotocopia impegnativa	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
IgE SPECIFICHE pannello aperto (anche ricombinanti)	<b>da ALL01 ad ALL12</b>	<b>265</b>	<b>ALLER</b>	Legnago	Sr	OCRA grande		Fotocopia impegnativa + fotocopia di eventuale richiesta dello specialista (vedi lista per inserimento del pannello desiderato)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
IgE TOTALI	<b>IGE</b>	<b>265</b>	<b>ALLER</b>	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
IgE pannello pediatrico	<b>M3M6</b>	<b>265</b>	<b>ALLER</b>	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
IgF 1 vedi SOMATOMEDINA C									
IgG SOTTOCLASSI (IgG 1-2-3-4)	<b>SIGG</b>	<b>317</b>	<b>SlgG</b>	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare e congelare a -20°.
IgH2	<b>IGH</b>	<b>221</b>	<b>BIOLM</b>	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	NON serve appuntamento	tel.045 8124266 / 4418
IMMBLOT SCL RP11	<b>SCL04</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
IMMBLOT SCL RP155	<b>SCL0</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
IMMUNOFENOTIPO leucocitario su sangue periferico o midollare NON per esterni	<b>MLFBG</b>	<b>337 337 338</b>	<b>MLFBG MLFBG MLFBG</b>	BRem	Sg o Mb	1VIOLA grande per sangue periferico 1 siringa eparinata per midollo	Entro h 7.30 + Modulo	Solo su APPUNTAMENTO tel .045 8128412 Solo per DH ONCOLOGIA	Dati anagrafici completi compreso LUOGO di nascita

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
IMMUNOFISSAZIONE	SBJ	064 043 010 044	CHIMM ETF NEFEL U-BJ	SB		2 rosa piccola + 1TRASP. grande + 1provetta U-VERDE			
IMMUNOGLOBULINE D(IgD)	IGD	010	NEFEL	Synlab		TRASPARENTE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
IMMUNOGLOBULINE IgA-IgG-IgM	IMM	010	NEFEL	SB	Sr	TRASPARENTE grande			
<i>INIBINA B</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<i>NO COD</i>			Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, congelatore n° 5 a -20°
INFLUENZA A e B	ABCRV	893	COROn	SB		Tampone rosso		Viene eseguita ricerca virus Influenza A e B su Cepheid con metodo PCR	
INSULA PANCREATICA anticorpi	ICA	220	DIAB	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
INSULINA	INSUL	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare e frigo n. 3 Congelare a -20° se non viene spedita in giornata
INSULINA Anticorpi	AAINS	389	AAINS	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare e congelare a -20°.
INSULINA CURVA da abbinare SEMPRE a GLUCOSIO CURVA	INSUC OGGT	952 953 939 940	INS30 INS60 INS90 IN120	Legnago	Sr	OCRA grande + ruggine piccola	BASE ( provetta 003 da congelare) 30' 60' 90' 120'	comprende anche curva del glucosio	Centrifugare e frigo n. 3 Congelare a -20° se non viene spedita in giornata
INTRADERMO REAZIONE alla tuberculina vedi MANTOUX									
IODIURIA (IODIO 24H)	IODU	895	IODU	Synlab	Urine	ROSSA grande			
<i>IPPURICO ACIDO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi</i> <i>personalmente alla Medicina del Lavoro</i> <i>B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<i>NO COD</i>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
ISAC IgE specifiche metodica immunoarray <i>N.B. NON SI EFFETTUA PER</i> <i>PAZIENTI INTERNI</i>	<i>NO COD</i>			Brip	Sr	OCRA grande	Si effettua SOLO per pazienti esterni, con impegnativa con dicitura "IgE specifiche pannello aperto quantità 6" e quesito diagnostico "ISAC"	Mandare paziente esterno in Immunopatologia B.R. 0458124256	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ISOFLURANO su siero o urine I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
ISTAMINA sangue  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD	Sg	VIOLA grande		Osped.Giustiniano 2° piano tel.049 8212781 deve arrivare entro le ore 16.00	In giornata in contenitore refrigerato a + 4° Altrimenti centrifugare, sierare, cong a -20° spedire congelato NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914
ISTAMINA urine  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD	Ur	Provetta U-VERDE	Urine estemporanee	Osped.Giustiniano 2° piano tel.049 8212781 deve arrivare entro le ore 16.00	In giornata e per 24 h conservare refrigerato a + 4° Altrimenti congelare a -20° e spedire congelato NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914
ISTOPLASMA anticorpi  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ITRAPONAZOLO  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR	PI	verde scuro piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
JAK2 Indirizzare il paziente in Segreteria Laboratorio - Pazienti seguiti da ONCOLOGIA di S.B.	JAK2	221	BIOLM	BR	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo		
KAPPA e LAMBDA urine	UKAPP	044	U-BJ	SB	Ur	Provetta U-VERDE	1° minzione	Esame di 2° livello se BJ positiva	
KEPPRA vedi LEVETIRACETAM									
KETONI urine vedi ACETONE									
KLEIHAUER - BERTKE test  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR	PI	verde scuro piccola + VIOLA grande	Entro h 7.30	Prendere accordi con BR tel. 045 8124584 / 4516	Il Laboratorio di Borgo Roma deve essere sempre avvisato dell'arrivo del test.

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
LAC (lupus anticoagulant) NO Centri Prelievi periferici	LAC	267	COAG3	Legnago	PI	azzurra piccola		NON eseguibile in pazienti in Terapia Anticoagulante. NO prelievi emolisati	Centrifugare per 10' a 3600 giri aliquotare prov. Ricentrifugare per 10'a 3600 giri aliquotare prov. Congelare a -20°
LACOSAMIDE N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR	PI	verde piccola			Sierare e congelare (scrivere su etichetta che è plasma con litio - epar)
LAMOTRIGINA	LAMOT	140	LAMOT	Synlab	Sr	BLU grande			centrifugare e congelare a -20°
LATTATO (acido lattico) NO Centri Prelievi periferici	ACLAT	41	SGAS*	SB	Sg	siringa eparinata	A freddo	Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti	
LDH (lattato deidrogenasi)	LDH	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
LDL COLESTEROLO	LDL	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola		Comprende colesterolo tot, HDL, LDL, trigliceridi	
LE cellule richiedere ANA + ABDNA									
LEGIONELLA Ab totali	ALEGI	208	LEGIO	Synlab	Sr	bianca piccola		L. Pneumophila - Tipo1	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
LEGIONELLA antigene su urine	LEGU	387	URLEG	SB	Ur	vasetto sterile			
LEISHMANIA anticorpi IgG	ALEIS	209	ALEIS	Synlab	Sr	bianca piccola		L. Infantum	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
LEPTOSPIRA Ab	ALEP	464	ALEP	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
LEVETIRACETAM (Keppra)	LEVET	335	LEVET	Synlab	Sr	BLU grande			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
LEVULINICO Acido Delta Ammino vedi ALA									
LH ormone Luteinizzante	LH	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONI NO Centri Prelievi periferici	SLINF	474	SLINF	BTct	Sg	viola piccola NON stappare		Entro h 7.30 No sabato	Inviare a B.Trento prima delle ore 10,00. Il Centro di Malattie Diffusive invia direttamente le provette a BT, qui escono solo i fogli di lavoro
LIPASI	LIPA	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
LIPOPROTEINA (a)	LPA	384	Lp(a)	SB	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
Liquido PERITONEALE	LQPR	916 917	LqUR LqSI	SB	Mb	U-ROSSA grande 2 provette		SOLO per DIALISI	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
Liquido PERITONEALE colturale	PERI	965	PERIT	Legnago	Mb	vasetto sterile			Tenere il campione in frigorifero
Liquido PLEURICO colturale	PLEU	927	PLEU	Legnago	Mb	vasetto sterile			Tenere il campione in frigorifero
LIQUIDO SEMINALE esame colturale vedi SPERMIOCOLTURA									
LIQUIDO SEMINALE spermogramma								Non richiedibile SB e Legnago	
LIQUOR Esame Chimico fisico su liquor + prelievo sangue	LIQUO	900 010 307	CHIMM NEFEL LIQUO	SB	Liquor + Sr	2 provette dedicate sterili tappo trasparente (liquor) 1 verde piccola (sangue) 1TRASPARENTE grande (sangue)			Provette liquor e istruzioni in settore accettazione
LIQUOR microbiologico	LIQM	324	LIQM	SB	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			Provette liquor e istruzioni in settore accettazione
LIQUOR virusbatteri	MENCE	366	MENCE	SB	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			Provette liquor e istruzioni in settore accettazione
LIQUOR Anticorpi anti antigeni di superficie neuronali  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Liquor + Sr	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente + 1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<p>LIQUOR Anticorpi anti- MOG</p> <p>N.B. SOLO PER INTERNI</p>	NO COD			BRnp	Sr	1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.
<p>LIQUOR TAU proteina</p> <p>N.B. SOLO PER INTERNI</p>	NO COD			BRnp	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.
<p>LIQUOR Anticorpi anti-Acquaporina 4</p> <p>N.B. SOLO PER INTERNI</p>	NO COD			BRnp	Sr	1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.
<p>LIQUOR Antigeni onconeurali</p> <p>N.B. SOLO PER INTERNI</p>	NO COD			BRnp	Sr	1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
LIQUOR Beta AMILOIDE A  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.
LIQUOR bande oligoclonali  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Liquor + Sr	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente + 1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.
LIQUOR ricerca BK(TBC)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			Se NON è possibile inviare in giornata conservare in frigorifero n.3
LIQUOR ricerca proteina 14.33  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.
LIQUOR biologia molecolare per BK(virus)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRm	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			Se NON è possibile inviare in giornata congelare in cong.n° 5 a -20°
LIQUOR ricerca virale(HSV; VZV; CMV; EBV; BK virus, ENTEROVIRUS)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRm	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			Se NON è possibile inviare in giornata congelare in cong.n° 5 a -20°, meglio a -80°

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<i>LIQUOR</i> <i>ricerca anticorpi anti Borrelia</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTm	Liquor + Sr	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente + 1 ruggine piccola (sangue)			<b>In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato.</b>
LISOZIMA MURAMIDASI	<b>LISOM</b>	<b>326</b>	<b>LISO</b>	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare, cong n°5 a -20°
<i>LISOZIMA urine</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi	Entro h 7.30		
LISTERIA <i>LINEZOLID</i>	<b>LISTE</b>	<b>465</b>	<b>LISTE</b>	Synlab	Sr	bianca piccola			Campione frigorifero n°3
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	PI	verde scuro piccola			
LITIO	<b>LI</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	Sr	rosa piccola			
LKM (anticorpi anti microsomi epatici e renali)	<b>LKM</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
LUPUS ANTICOAGULANT vedi LAC									
LUTEINIZZANTE ORMONE vedi LH									
LYME TEST vedi BORRELIA Ab									
<i>MAG Ab</i>	<b>MAG</b>	<b>419</b>	<b>MAG</b>	BRnp	Sr	OCRA grande			Centrifugare, sierare, cong n°5 a -20° Compresa nella richiesta Anticorpi anti Nervo
MAGNESIO	<b>MG</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola			
MAGNESIO urine	<b>MGU</b>	<b>017 902</b>	<b>DIUcc ChUri</b>	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
MALARIA (e parassiti ematici) ricerca microscopica	<b>MALAR</b>	<b>312</b>	<b>MALAR</b>	SB	Sg	viola piccola		Contattare il laboratorio	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<i>MALARIA anticorpi</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Negrar	Sr	OCRA grande		E' possibile conservare in frigo a +4° per alcuni giorni	Inviare siero NON congelato 10-15 gg per la risposta
MANTOUX	INTRA	203	INTRA	SB		In vivo sul paziente		Eseguibile solamente a S.Bonifacio. NON si esegue il Giovedì	
<i>MANDELICO ACIDO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>MANGANESE</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>MERCURIO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>METANOLO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
MDMA (Ecstasy) Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	MDMA	040	DAU-A	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA-U se viene richiesto singolarmente	
METADONE Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	META	040	DAU-A	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA-U se viene richiesto singolarmente	
METAEMOGLOBINA <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	MHB	041	SGAS*	SB	Sg	Siringa eparinata	A freddo	Consegnare campione subito in Laboratorio a FREDDO	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
METANEFINE urine (metanefrina+normetanefrina)	METAU	017 432	DIUcc uMETA	Synlab	Ur 24h	Bidone + 5 mL HCl 32% U_ROSSO con diuresi			Campione frigorifero n°3
METILTETRAIDROFOLATO REDUTTASI vedi MTHFR									
METHOTREXATE  N.B. SOLO PER INTERNI Chiamare Borgo Trento per avvisare che verranno inviati campioni per il dosaggio del farmaco.	NO COD			BT	Sr	BLU grande	Prelievo eseguito a freddo e al buio. Su ogni prelievo indicare data e ora. Sul Modulo di accompagnamento indicare quando è stata fatta la somministrazione del farmaco.	Possono essere inviati fino a 10 campioni. Prima della somministrazione fare un prelievo e indicare "tempo 0". La cadenza oraria dei successivi campioni è stabilita secondo indicazioni del medico richiedente. Il test viene effettuato per verificare in quanto tempo il paziente smaltisce il farmaco.	Centrifugare, sierare, conservare in frigorifero n.3 al buio (avvolgere in carta stagnola)
METILETILCHETONE I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
MICOBATTERI vedi BK									
MICOFENOLATO	MICOF	214	MICOF	Synlab	Sg	VIOLA grande			NON centrifugare
MICOPLASMA IGM	MICOM	901	MICOM	SB	Sr	ruggine piccola			
MIELOGRAMMA (midollo esame microscopico)	MID	014	MIDOL	SB	Mb	vetrino			
MIELOPEROSSIDASI Ab fa parte del gruppo ANCA									
MIOGLOBINA								Non richiedibile	
MIOSITE anticorpi	ABMIO	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande			
MITOCONDRIO anticorpi vedi AMA									
MORBILLO anticorpi IgG	AMOR0	294	SIERL	Legnago	Sr	rossa piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
MORBILLO anticorpi IgM	AMOR1	294	SIERL	Legnago	Sr	rossa piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
MORBILLO ricerca in PCR  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRm	Sr	VIOLA grande		Esame di 2° livello, contattare il laboratorio Brm tel. 045 8124720	NON CENTRIFUGARE Provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
MPO mieloperossidasi fa parte del gruppo ANCA									
MTHFR	MTHFR	750	MTHFR	Synlab	Sg	VIOLA grande	+ Modulo		NON CENTRIFUGARE campione frigo n°3 Eeguire solo se Omocisteina elevata
<i>MUCONICO ACIDO TRANS</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i> <i>MUCOPOLISSACCARIDI</i>								Non più richiedibile.	BRnp non lo esegue più
MUSCOLO LISCIO Ab vedi ASMA									
MUSCOLO STRIATO anticorpi	CUORE	494	CUORE	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
MUTAZIONE FATTORE II	FIIM	293	FVFII	Legnago	Sg	VIOLA grande			Non centrifugare
MUTAZIONE C677T vedi MTHFR									
Mutazione Fatt. PROTROMBINA vedi MUTAZIONE FATTORE II									
MUTAZIONE FATTORE V DI LEIDEN	LEID	293	FVFII	Legnago	Sg	VIOLA grande			Non centrifugare
MUTAZIONE G20210 A della Protrombina vedi MUTAZIONE FATTORE II									
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG IgM	AMIC	703	APNEU	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>NERVO anticorpi</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Screening comprende: Ab anti- GM1; aGM1 Ab anti-GD1a; GM2 Ab anti-GD1b e disialogangliosidi Ab anti-GQ1b Ab anti-MAG Ab anti-sulfatidi Ab anti-condroitin solfato	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 Neuropatologia BR tel.0458124461

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<i>NICHEL</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
NON ORGANO SPECIFICI vedi ANA									
NOTCH3 ricerca mutazione gene	<b>NOTCH</b>	<b>992</b>	<b>NOTCH</b>	BRnp	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo		Non inviare il venerdì, inviare CONSENSO INFORMATO e breve anamnesi clinica familiare
NSE	<b>NSE</b>	<b>346</b>	<b>IMMUL</b>	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, aliquota frigorifero n°3, tenere provetta madre. (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
NUGENT test cortisolo accettare CORTISOLO mattino (Desametasone)	<b>CORT</b>	<b>710</b>	<b>CORT</b>	Legnago	PI	VERDE grande		<b>1°giorno eseguire prelievo BASE ore 23:00 somministrare il farmaco 2°giorno eseguire 2° prelievo</b>	Centrifugare e frigo n. 3 Congelare a -20° se non viene spedita in giornata
NUCLEO Ab vedi ANA									
NUCLEO-ESTRAIBILI Ab vedi ENA									
OLIGOCLONALI bande su liquor vedi LIQUOR									
OMOCISTEINA	<b>OMO</b>	<b>478</b>	<b>OMO</b>	Legnago	PI	Provetta dedicata KABE			NO campioni emolizzati
<i>OMOVANILICO ACIDO</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	Ur 24h	Bidone + 5 mL HCl 32% (Prima della raccolta) provet. U_ROSSO con diuresi		1 provetta per il test 1 provetta per la diuresi	Campione frigorifero n°3
<i>OMOVANILICO ACIDO</i> <i>Richiesto per motivi di lavoro Il paziente esterno deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ONCONEURALI Ab	ABNEU	454	ABNEU	BRnp	Sr	ruggine piccola		<b>Solo x NEUROLOGIA S.Bonifacio</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 Se il campione arriva il venerdì : sierare e congelare
OPPIACEI Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	OPPI	040	DAU-A	SB	Ur	provetta U-ARANCIO		ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) richiedere sempre anche CREA-U	
ORMONE ADRENOCORTICOTROPO vedi ACTH									
ORMONE LUTEINIZZANTE vedi LH									
OSMOLALITA' PLASMATICA	OSP	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
OSMOLALITA' URINARIA	OSU	362	U-OSM	Legnago	Ur	U_VERDE			Campione frigorifero n°3
<b>OVOMUCOIDE</b>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BT	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
OSSALATO URINARIO	OSSAL	017 477	DIUcc OSSAL	Synlab	Ur 24h	Bidone + 5 mL HCl 32% ( Prima della raccolta) provetta U_ROSSO con diuresi			Campione frigorifero n°3
OSTEOCALCINA (BGP)	OSTEO	497	OSTE	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare,sierare, cong.n°5 a -20°
OXCARBAZEPINA (MONOIDROSSICARBAZEPINA)	OXC	498	OXC	Synlab	Sr	BLU grande			centrifugare e congelare a -20°
P1NP (propeptide del collagene tipo 1)	PRP	601	PROP	Br	Sr	bianca piccola		Appuntamento tel. 045/8124312	Centrifugare,sierare, cong.n°5 a -20° <b>il prima possibile</b>
PARAMIXOVIRUS Ab									I Paramixovirus sono: virus morbillo, parotite, RSV e parainfluenzale (quest'ultimo non si esegue)
PARACETAMOLO	PARAC	214	PARAC	BT	PI	verde piccola		Esame eseguibile in regime d'urgenza	Centrifugare, sierare, conservare in frigo n. 3 a +4 ° fino a 48h, passate le 48h sierare e cong. n°5
PARASSITI ricerca feci	PARF1 PARF2 PARF3	183 184 185	Vster	Synlab	feci	Vasetto sterile	N.B. Ogni campione deve essere prescritto con impegnativa singola	Trasferire una noce di feci in barattolino apposito fornito da Legnago	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
PAROTITE anticorpi IgG	APAR0	294	SIERL	Legnago	Sr	ROSSA grande			
PAROTITE anticorpi IgM	APAR1	294	SIERL	Legnago	Sr	ROSSA grande			
PARVOVIRUS B19 Ab (IgG+IgM)	APARV	539	APARV	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>PARVOVIRUS B19 ricerca in PCR</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRm	Sg	VIOLA grande		Esame di 2° livello, contattare il laboratorio Brm tel. 045 8124639	Provetta frigorifero n° 3
PCR (proteina C reattiva)	PCR	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
PEPTIDE CITRULLINATO CICLICO vedi CITRULLINA Ab									
<i>PEPSINOGENO</i> <i>Il paziente deve rivolgersi a PD</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			PD	Sr	TRASPARENTE grande		Lab. PD 0498212781	<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
<i>PERCLOROETILENE sangue e urine</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
PERTOSSE (Bordetella pertussis) Ab (IgG-IgA)	APERT	202	APERT	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>PICORNA VIRUS anticorpi</i>								Non più eseguibile	BTm non esegue più
PFA 100 NO Centri Prelievi periferici	PFA	026 145	PFA EF	SB	Sg	azzurra piccola + lilla piccola		Eseguibile solamente a S.Bonifacio.	NON CENFRIFUGARE Portare il prelievo subito nel settore COAGULAZIONE
PHADIATOP (IgE Screening)	PHAD0	265	ALLER	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PIASTRINE anticorpi [Se richiesto anche COMPLESSO EPARINA/ PF4 è necessaria VIOLA grande]	APIAS	431	APIAS	BTct	Sr	TRASPARENTE grande	Modulo fornito da nostro C.T. <b>Eeguire il prelievo il Martedì</b>	<b>Solo su appuntamento al ct BT tel. 045 8127017</b> <b>Allegare modulo dedicato</b>	<b>Viene eseguito SOLO il GIOVEDÌ!</b> Il prelievo deve arrivare a B Trento il giorno precedente.
PIOMBO	PIOMB	480	PIOMB	Synlab	Sg	verde scuro			NON CENTRIFUGARE Provetta frigorifero n°3 Spedire il sangue intero.
PIOMBO urine	PBU	116	U-PB	Synlab	Ur	U_VERDE	No urine 24h	Specificare se urine di inizio o fine turno.	Campione frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
PIRUVATO KINASI (PK)	PK	588	PK	Synlab	Sg	VIOLA grande			Campione frigorifero n°3
PLASMINOGENO	PLASM	428	PLASM	Synlab	PI	azzurra piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
PML/RAR alfa1 Riarrangiamento genetico malattie oncologiche	PML	221	BIOLM	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo		
PNEUMOCOCCO antigene urinario	UPNE	387	URLEG	SB	Ur	vasetto sterile			
PNEUMOTROPI (AGENTI) anticorpi richiedibili anche separatamente.	APNEU	703	APNEU	Synlab	Sr	bianca piccola		Comprende:Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorio sinciziale, Chlamydia pneumoniae/psittaci. Non si esegue Parainfluenzae 3.	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>PNEUMOCISTI CARINII</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<i>NO COD</i>			BRap	Mb	vasetto sterile	Entro h 7.30	<b>Si esegue su Bronco Lavaggio NON su Bronco Aspirato</b>	Anatomia patologica BR tel 045 8124840 4830 3211
<i>PNEUMOCOCCO anticorpi (PCP)</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<i>NO COD</i>			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 <b>spedire a + 4°</b>
PCR Polimerasi HBV DNA vedi HBVDNA									
POLYPEPTIDE VASOATTIVO INTESTINALE vedi VIP									
PORFIRINE urinarie (totali) U- PORFOBILINOGENO (PORFO) U- COPROPORFIRINE (COPRO) U- UROPORFIRINE (URPOR) U -PORFOBILINOGENO (PORFO) ACIDO AMINOLEVULINICO (ALA)	UPORF	315 340 606	*PORF *COPR U-ALA	BR	Ur 24h	3provette urine tappo U_ ROSSO.	Al Buio	Durante la raccolta le urine vengono conservate al buio. Comprende acido aminolevul. Tenere congelati i campioni	
<i>POSACONAZOLO</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<i>NO COD</i>			BR	PI	verde scuro piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
<i>POLIO VIRUS</i>	<i>NO COD</i>			Synlab	Sr	bianca piccola		Poliovirus 1 e 3 Abs	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
POTASSIO	K	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
POTASSIO urine	KU	017 902	DIUcc CHIMM	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
PR3 Ab proteinasi 3 fa parte del gruppo ANCA									
PREALBUMINA	PAB	442	PAB	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PRECIPITINE								Non richiedibile	
PRIMIDONE	PRIM	124	PRIM	Synlab	Sr	BLU grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PROCALCITONINA (PCT)	PROCA	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
PROCOLLAGENE tipo III								Non richiedibile	
PROCOLLAGENE tipo I	P1NP	601	PROP	BR	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20° il prima possibile.
PROGESTERONE	PROG	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PROGESTERONE 17 OH	17OHP	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
PROLATTINA	PRL	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PROLATTINA 3 prelievi temporizzati	HPRLC	003 067 159	CHIMM PRL20 PRL40	Legnago	Sr	OCRA grande		Segnare l'ora di prelievo	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PROTEINA C (coagulazione)	PROTC	002	TROMB	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
PROTEINA CATIONICA degli EOSINOFILI vedi ECP									
PROTEINA DI BENICE-JONES	UBJ	064 043 044	CHIMM ETF U-BJ	SB	Sr + Urine	2 rosa piccola + provetta U_VERDE		Il minzione	1 goccia di Na azide nelle urine
PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO vedi RBP									
PROTEINA S (coagulazione)	PROTS	002	TROMB	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
PROTEINA S 100	PS100	049	S100	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare e congelare a -20°
PROTEINASI 3 Ab fa parte del gruppo ANCA									
PROTEINE TOTALI	PROT	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
PROTEINE URINE	PROTU	017 902	DIUcc ChUri	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
PROTEINURIA FRAZIONATA NOTTE	PRTNT	017 597	DIUcc U-NOT	SB	Urine	Bidone + 2 provette U_ROSSO+ diuresi+ orario			
PROTEINURIA FRAZIONATA ORTOSTATISMO	PRTOR	017 598	DIUcc U-ORT	SB	Urine	Bidone + 2 provette U_ROSSO+ diuresi+ orario			
PROTEINURIA FRAZIONATA CLINOSTATISMO	PRTCL	017 596	DIUcc U-CLI	SB	Urine	Bidone + 2 provette U_ROSSO+ diuresi+ orario			
<i>PROTOSSIDO DI AZOTO I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>									
PROTROMBINA MUTAZIONE vedi FATTORE II MUTAZIONE									
PSA	PSA	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
PSA LIBERO	PSA PSA4	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<i>PSEUDOMONAS Ab</i>								Non richiedibile	BTm non lo esegue
PT (tempo di protrombina, di Quick)	PT	300	COAG	SB	PI	azzurra piccola			
PTH	PTH	711	PTH VERDE	Legnago	PI	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
PTT (aPTT – tempo di tromboplastina parziale attivata)	PTT	300	COAG	SB	PI	azzurra piccola			
QUANTIFERON	QUANT	353 343 344 345	Q-VER Q-GRI Q-ROS Q-VIO	SB	PI	4 provette specifiche da richiedere in laboratorio	Riempire le provette fino alla tacca indicata, non di più e non di meno. Prelevare tutte e quattro le provette.	<b>NO venerdì NO Sabato NO i gg. precedenti le festività</b>	Mescolare delicatamente per inversione prima di mettere in termostato per 24 H. Poi centrifugare e conservare a + 4°
RAME	CU	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
RAME urine	CUU	017 802	DIUcc U-CU	Synlab	Ur 24h	Bidone + U_ROSSO + diuresi			Campione frigorifero n°3
RAST vedi IgE specifiche									
RBP (proteina legante il retinolo)	RBP	347	RBP	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
Recettore solubile della Transferrina vedi TRANSFERRINA Recettore Solubile									
RENINA	SARR			Legnago	PI	2 provette VIOLA grande		Si richiede sempre rapporto Renina/Aldosterone	Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20° Scartare campioni emolizzati o fortemente lipemici.
RENINA + ALDOSTERONE ( Ortostatismo / clinostatismo)	SARR	483 817	REN ALDO	Legnago	PI	2 provette VIOLA grande			Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20° Scartare campioni emolizzati o fortemente lipemici.
RENINA clinostatismo + ortostatismo	SARR			Legnago	PI	2 provette VIOLA grande		Non più richiedibile singolarmente Renina clino e/o Renina orto. Si richiede sempre rapporto Renina/Aldosterone	Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20° Scartare campioni emolizzati o fortemente lipemici.
RETICOLINA Ab									
RETICOLOCITI	RET	145	EF	SB	Sg	lilla piccola			
RETINOLO proteina legante vedi RBP									
RIARRANGIAMENTO JAK2 vedi JAK2									
RICKETTSIA CONORI IgG/IgM (weil felix)	ARICK	469	ARICK	Synlab	Sr	bianca piccola		Se richiesta RICKETTSIA TYPHI cod 532 Se richiesta RICKETTSIA CONORI cod 5320	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
RISTOCETINICO COFATTORE vedi Cofattore Restocetinico									
ROCHALIMAEA Ab vedi BARTONELLA Ab									
ROSOLIA anticorpi IgM e IgG	ROSO	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ROSOLIA VIRUS ricerca in PCR  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Sg o Liquor o altri materiali no urine	VIOLA grande o provetta dedicata per liquor o vasetto sterile		Esame di 2° livello, da concordare con il laboratorio microbiologia BT Tel. 045 8122461	Campione frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
ROSOLIA avidità IgG Esame di 2° Livello (inserito direttamente dal Laboratorio Analisi)	<b>TORC9</b>	<b>672</b>	<b>VIDAS</b>	Legnago	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ROTAVIRUS FECI antigeni	<b>ROTA</b>	<b>392</b>	<b>VIRUS</b>	SB	Feci	vasetto sterile			
SALI BILIARI (acidi biliari)	<b>ACB</b>	<b>003</b>	<b>CHIMM</b>	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
SALICILATI	<b>SALIC</b>	<b>421</b>	<b>SALIC</b>	Synlab	Sr	BLU grande			
SANGUE OCCULTO nelle feci	<b>S.OCC</b>	<b>302 349 350</b>	<b>SOC SOC2 SOC3</b>	Bussolengo	Feci	contenitore apposito			Conservare il campione in frigorifero massimo 3 giorni
SATURAZIONE DELLA TRANSFERRINA vedi TIBC									
SCOTCH TEST (ricerca ossiuri)	<b>SCOTC</b>	<b>193</b>	<b>SCOTCH</b>	Legnago		Vetrino			
SCLERODERMIA anticorpi	<b>ABSCL</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
SCHISTOSOMA ricerca diretta su feci inserire PARASSITI	<b>PARF1</b>			Legnago	Feci		Scrivere "SCHISTOSOMA" su Etichetta	Trasferire una noce di feci in barattolino apposito fornito da Legnago	
SCHISTOSOMA Anticorpi N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
SEROTONINA (5-OH triptamina)	<b>SEROT</b>	<b>484</b>	<b>SEROT</b>	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
SHBG (globulina legante gli ormoni sessuali)								Non richiedibile	
SINOVIALE LIQUIDO esame chimico fisico	<b>VERSI</b>	<b>306</b>	<b>SINOV</b>	SB	Mb	vasetto sterile		Consegnare entro 30 minuti per ricerca cristalli	
SLA (anti ag epatico solubile) compreso nei BLOT LIVER	<b>LIVER</b>	<b>280</b>	<b>IMMAU</b>	SB	Sr	OCRA grande			
Sm AB Ab richiedere ENA									
SODIO	<b>NA</b>	<b>900</b>	<b>CHIMM</b>	SB	PI	verde piccola			
SODIO urine 24h	<b>NAU</b>	<b>017 902</b>	<b>DIUcc ChUri</b>	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
SOMATOMEDINA C (IGF 1)	<b>SOMAT</b>	<b>346</b>	<b>IMMUL</b>	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
SOMATOTROPINA ORMONE o GH	<b>GH</b>	<b>457</b>	<b>GH</b>	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare e congelare a -20°

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<b>SOLFOEMOGLOBINA</b> <i>Il paziente ESTERNO deve rivolgersi personalmente a BR</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR					
<b>SOLVENTI</b> <i>Xilene- Benzene -Acetone - ecc.</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<b>SOMASTOSTATINA</b>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			PD	PI	VIOLA grande	A freddo		<b>Separare velocemente e congelare il plasma cong.n°5</b> <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
<b>SPINK 1</b>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BRap	Sg	VIOLA grande			<u><b>NON aprire la provetta</b></u>  Dott.ssa Montresor Dott. Scarpa tel 045 8124822 Campione frigorifero n° 3
<b>SPERMIOCOLTURA (ESAME CULTURALE LIQUIDO SEMINALE)</b>	<b>LSEM</b>	<b>955</b>	<b>LSEM</b>	Legnago	Sperma	Vasetto sterile			
<b>SPERMIOCOLTURA MST ( LIQUIDO SEMINALE Malattie Sessualmente Trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonocco.....)</b>	<b>SEM</b>	<b>811</b>	<b>SEM MST</b>	Legnago	Sperma	Vasetto sterile			
<b>STEROIDI URINARI</b>	<b>STERU</b>	<b>017 151</b>	<b>DIUcc uSTER</b>	Synlab	Ur 24h	Bidone + 5 mL HCl 32% provetta U_ROSSO + diuresi			Su Vademecum Synlab sotto la voce : 17 - Chetosteroidi Urine
<b>STAFILOLISINA ALFA Ab</b>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>								Non più eseguibile	BTm non la esegue più

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
<i>STIRENE</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
STREPTO DNAasi B anticorpi	<b>ASDNA</b>	<b>873</b>	<b>NEFEL</b>	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
STRONGYLOIDES STERCORALIS AB	<b>STRON</b>	<b>814</b>	<b>STRON</b>	Synlab	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TACROLIMUS vedi FK 506									
<i>TALASSEMIA (biologia molecolare)</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	Sg	VIOLA grande		Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	Campione frigorifero n° 3 NON aprire la provetta
TAMPONE VAGINALE	<b>TVAG</b>	<b>215</b>	<b>TVAG</b>	Legnago	Mb	1 tampone rosa 1 vetrino 1 tampone blu lungo	+ Modulo Accompagnamento	<b>Indicare sempre valore pH</b>	
TAMPONE VAGINO-RETTALE	<b>TVGR</b>	<b>551</b>	<b>AGAVR</b>	Legnago	Mb	Tampone azzurro			
TAMPONE URETRALE (batteri e miceti)	<b>URETR</b>	<b>505</b>	<b>URETR</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE URETRALE (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....)	<b>URE</b>	<b>815</b>	<b>T. URT</b>	Legnago	Mb	Tampone rosso			
TAMPONE CERVICALE (batteri e miceti)	<b>ENDOC</b>	<b>506</b>	<b>ENDOC</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE CERVICALE (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....)	<b>CER</b>	<b>168</b>	<b>T.CER</b>	Legnago	Mb	Tampone rosso			
PATOGENI URINE (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) 1° Mitto	<b>URIN</b>	<b>816</b>	<b>URINE</b>	Legnago	Ur	Provetta U_BIANCO			
TAMPONE AURICOLARE DX	<b>TAUR</b>	<b>519</b>	<b>TAUR</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE AURICOLARE SX	<b>TAURS</b>	<b>529</b>	<b>TAURS</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	<b>TSBP</b>	<b>974</b>	<b>TSBP</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE CUTE	<b>TC</b>	<b>975</b>	<b>TC</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
RICERCA DERMATOFITI	<b>DERM</b>	<b>530</b>	<b>MICE?</b>	Legnago	Mb	Vasetto sterile rosso			
TAMPONE FERITA	<b>TFER</b>	<b>976</b>	<b>TFER</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE OROFARINGEO	<b>OFMI</b>	<b>507</b>	<b>OFMI</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE OMBELICALE	<b>OMB</b>	<b>522</b>	<b>OMB</b>	Legnago	Mb	Tampone rosa			

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
TAMPONE PIAGA DECUBITO	TPG	981	TPG	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE NASALE	NMI	521	NMI	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE LINGUALE	TLING	954	TLING	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE ULCERA	TULC	982	TULC	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE VULVARE	TVULV	983	TVULV	Legnago	Mb	Tampone rosa			
TAMPONE RETTALE	TC	975	TC	Legnago	Mb	Tampone rosa		Inserire TC	E' un tampone cute, si segnala zona di prelievo rettale
TAMPONE COVID-19 MOLECOLARE	COR10	893	COROn	SB	Mb	Tampone rosso			
TAMPONE COVID-19 4° GENERAZIONE	AGCOV	821	AGCOV	SB	Mb	Tampone bianco			
TAMPONE COVID-19 2° e 3° GENERAZIONE	COVAG	893	COROn	SB	Mb	Kit Lumira			
TAMPONE COVID- 19 MOLECOLARE URGENTE Eseguito SOLO dal Pronto Soccorso	COVUR	295	COVUR	SB	Mb	Tampone rosso		Richiedibile solo da PS (no PS Pediatrico)	
TAMPONE MOLECOLARE VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE	RSVMO	893	COROn	SB	Mb	Tampone rosso		Viene eseguito SOLO RSV	
TAMPONE MOLECOLARE VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE + COVID + INFLUENZA A e INFLUENZA B	ABCRV	893	COROn	SB	Mb	Tampone rosso		Eseguito RSV + COR10 + INFLUENZA A e INFLUENZA B	
TAO (PT per pazienti in terapia anticoagulante orale)	TAO	100	COAG	SB	PI	azzurra piccola			
TAS	TAS	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TCR2 clonalità malattie Oncoematologiche	TCR	221	BIOLM	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30		tel.045 8124266 / 4418
TEOFILLINA	TEO	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
TEST di LYME vedi BORRELIA Ab									
TENIA ricerca Feci	PARF1	183	Vster	Legnago	Feci	Vasetto rosso		Scrivere su etichetta : " TENIA"	
TESTOSTERONE LIBERO	FTES	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
TESTOSTERONE TOTALE	TESTO	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TETANO Ab	TETAN	294	VIROL	Legnago	Sr	ROSSA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TIBC (capacità ferrolegante, saturazione transferrina)	TIBC	900 003	CHIMM CHIMM	SB Legnago	PI Sr	verde piccola + OCRA grande			Centrifugare, provetta OCRA frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
TINE TEST vedi MANTOUX									
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA vedi LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONE									
TIREOGLOBULINA	TIREO	425	CTXTG	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
TIREOGLOBULINA Ab	ABTG	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TIREOPERROSSIDASI Ab (Ab-TPO)	ABTPO	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
TIREOTROPINA vedi TSH recettore									
TIROSINCHINASI vedi Ab anti IA2									
<b>TOBRAMICINA</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
TOPIRAMATO	TOPIR	102	TOPIR	Synlab	Sr	BLU grande			Sierare + conservare in frigo + 4°
TOTAL CD3 + (T cells) compreso in LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONE									
TOTAL LYMPHOCYTES % (T+B+NK) compreso in LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONI									
TOXOCARA CANIS Ab IgG	TOXCA	813	TOXCA	Synlab	Sr	bianca piccola		Vengono determinate solo le IgG	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 Test di conferma IgG+IgM presso laboratorio Synlab Germania (esame non codificato)
TOXOPLASMA GONDII Ab IgM e IgG	TOXO	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TOXOPLASMA GONDII avidità IgG	TOAVG	672	VIDAS	Legnago	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
<b>TOXOPLASMA ricerca in PCR</b>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTm	Sg o Liquor o Liquido amniotico	VIOLA grande o provetta dedicata per liquor o vasetto sterile		Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	
TPHA	TPHA	892	SIERL	Legnago	Sr	CEDRO			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TRANSFERRINA	TRF	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
TRANSFERRINA RECETTORE SOLUBILE	TRS	809	TRS	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TRANSGLUTAMINASI (TTG) IgA	TTG	010 280	NEFEL IMMAU	SB	Sr	TRASPARENTE grande + OCRA grande		Richiedere sempre immunoglobuline IgA - IMM52	
TRANSGLUTAMINASI monitoraggio	TTGM	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande		solo per pazienti esenti per celiachia	
TRANSGLUTAMINASI (TTG) IgG	TTGG	280	IMMAU	SB	Sr	OCRA grande		Si esegue solo se presente deficit IgA	
<i>TRANSTIRETINA mutazione</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Brnp	PI	VIOLA grande 3 provette	Entro h 7.30 + Modulo per consenso analisi genetiche	tel. 045 8124461	Se NON è possibile inviare il campione al mattino conservare a +4°e spedire il giorno successivo
<i>TRICLOROACETICO ACIDO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>TRICLOROETILENE</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
<i>TRYPANOSOMA Ab</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Negrar	Sr	OCRA grande	Specificare se <u>BRUCEI</u> (Africa) o <u>CRUZI</u> (SudAmerica). <u>Per ricerca T. Cruzi serve il modulo apposito</u>	NO venerdì NO Sabato NO i gg precedenti le festività	Centrifugare, sierare, campione in frigo n°3. S può conservare per alcuni giorni.
TREPONEMA PALLIDUM Ab IgM (EIA)	MTREP	892	SIERL	Legnago	Sr	CEDRO		Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TREPONEMA PALLIDUM Ab screening	ABTP	892	SIERL	Legnago	Sr	CEDRO			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TRIGLICERIDI	TRIG	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
TRIPTAMINA 5 OH vedi SEROTONINA									
TRIPTASI	TRIPT	265	ALLER	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
TROPONINA T	TNT	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
TSH	TSH	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
TSH curva dopo stimolo con TRH	TRH	079 080 081 082 083 084	TSH0 TSH1 TSH2 TSH3 TSH4 TSH5	SB	PI	verde piccola		Concordare con il Laboratorio	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
TSH RECETTORE anticorpi anti (TBI, TRAb)	ACTBI	346	IMMUL	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)
TSH riflesso	TSHR	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
URATO (acido urico)	URIC	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
URATO (acido urico) urine	URICU	017 902	DIUcc ChUri	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
UREA	UREA	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
UREA urine	UREAU	017 902	DIUcc ChUri	SB	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi			
URINE esame standard	ESU	016	STAND	SB	Ur	provetta U-GIALLO			
VALPROICO ACIDO (dipropilacetato)	VALPR	900	CHIMM	SB	PI	verde piccola			
VANCOMICINA	VANCO	460	VANCO	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VANILMANDELICO ACIDO (VMA)	VMA	017 316	DIUcc uVMA	Synlab	Ur 24h	Bidone + 5 mL HCl 32% provetta U_ROSSO + diuresi			Campione frigorifero n°3
VARICELLA ZOSTER IgG	VZV1	294	VIROL	Legnago	Sr	ROSSA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VARICELLA ZOSTER IgM	VZV2	294	VIROL	Legnago	Sr	ROSSA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VDRL	VDRL	892	SIERL	Legnago	Sr	CEDRO		Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VERSAMENTI ES CHIMICO-FISICO (eccetto sinoviale)	VER	305	VER	SB	Mb	vasetto sterile		<b>Specificare il tipo di materiale</b>	
VES	VES	001	EF	SB	Sg	lilla piccola			
VIP POLIPEPTIDE VASOATTIVO INTESTINALE NON PER ESTERNI	VIP	438	* VIP	Padova	PI	lilla piccola	A freddo		Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°. Eseguito nel Lab centrale PD ospedale Giustiniano NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914
VIRUS INFLUENZAE (A e B) vedi Influenza A e Influenza B									

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgA	VRS	703	VRS	Synlab	Sr	bianca piccola			
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE antigene	RSVMO	893	COROn	SB	Mb	Tampone rosso		Viene eseguita ricerca RSV su Cepheid con metodo PCR	
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE coltura  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			Btm	Sr	bianca piccola		<b>Non eseguibile. Richiedere Ricerca DNA con metodo PCR su siero.</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VITAMINA A NO Centri Prelievi periferici	VA	708	VitA*	Synlab	PI	VIOLA grande	Al Buio Al Freddo	Provetta avvolta in stagnola. Non eseguibile nei centri prelievi periferici ( necessita centrifugazione entro 30 min)	Centrifugare in centrifuga refrigerata, sierare, cong. n° 5 a -20° al buio.
VITAMINA B1 NO Centri Prelievi periferici N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			Synlab	PI	VIOLA grande	Al Buio A freddo	provetta avvolta in stagnola	<b>CONGELARE IL SANGUE INTERO</b>
VITAMINA B6 NO Centri Prelievi periferici	VB6	709	VB6*	Synlab	Sr	OCRA grande	Al Buio A freddo	provetta avvolta in stagnola; non eseguibile nei centri prelievi periferici ( necessita centrifugazione entro 30 min)	Centrifugare in centrifuga refrigerata, sierare, cong. n° 5 a -20° al buio.
VITAMINA B12	VB12	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VITAMINA D (25OH)	VD	003	CHIMM	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
VITAMINA E NO Centri Prelievi periferici N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			Synlab	PI	VIOLA grande	Al Buio A freddo	provetta avvolta in stagnola; non eseguibile nei centri prelievi periferici ( necessita centrifugazione entro 30 min)	Centrifugare, 2 aliquote di plasma in <b>provette avvolte in stagnola</b> , congelare cong n°5 -20°, inviare congelate. Specificare la vitamina richiesta.
VANADIO I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	

DESCRIZIONE ANALISI	Cod. accettaz.	Cod. provetta	Cod. Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/ contenitore	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)
VIBRIO CHOLERAEE , ricerca  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Feci	vasetto sterile		<b><u>Si consiglia invio immediato, eventualmente conservazione in frigo per un giorno al massimo.</u></b>	Campione frigorifero n°3
VORICONAZOLO	VORI1	104	VORIC	BR		verde scuro piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°
WEIL FELIX vedi RICKETTSIA Ab									
WEST NILE FEVER	WNV (test di screening) WNVC (test di conferma)	294 - 888 -749 - 854	ARBO – ARBPD – U-ARB	Legnago / Padova	Sr / Urine e Sg	1 rossa piccola / 1 BLU grande - 1 urina sterile - 2 lilla piccola		Eseguire un duplicato delle etichette	Centrifugare provetta rossa e mandare a Legnago; Centrifugare provettaBLU e lilla e aliquotare e cong. a -80° Inviare allegato a Legnago e PD.
WIDAL-WRIGHT	WW	249	WW	Legnago	Sr	ROSSA grande		N.B. Il reparto DEVE venire in Laboratorio per ritirare le provette	
X - FRAGILE (biologia molecolare) Il paziente ESTRNO deve rivolgersi personalmente a BR  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD								
XILENI I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295	
YERSINIA	FYER	490	FYER	Legnago	Feci	T. Verde			Conservare a temp. Ambiente
ZECCA Ab vedi BORRELIA Ab									
ZIKA	ZIKA	935 936 937 938	ZIKA	Padova	Sr Urine Sg Saliva	2 rossa piccola 2 urine sterili 2 lilla piccola provetta saliva	Da inviare entro 72h	Eseguire un duplicato delle etichette	Centrifugare provetta rossa, frigorifero n°3 compilare allegato <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>
ZINCO	ZINCO	481	ZINCO	Synlab	Sr	BLU grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3
ZINCO Ab anti trasportatore 8	ZNT8	113	ZNT8	Synlab	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se si superano i 3gg)